

(en) 10-mm Light Guide

(fr) Guide faisceau de 10 mm de diamètre

(es) Guía de luz de 10 mm

Filtek TM Z250 A3 (3M ESPE)	Grandio [®] A3 (Voco)
Filtek TM P60 A3 (3M ESPE)	Charisma [®] A3 (Heraeus)
CeramX TM duo E3 (Dentsply)	Venus TM A3 (Heraeus)
QuiXX TM Posterior Restorative (Dentsply)	Tetric [®] EvoCeram A3 (Ivoclar Vivadent)
EsthetX [®] HD A3 (Dentsply)	Estelite [®] Sigma Quick A3 (Tokuyama)
TPH3 [®] A3 (Dentsply)	



(en) Composite filling materials which can be used with an exposure time of 5 sec

If it is possible to place the light guide at a minimum distance, the composite filling materials listed here as well as lighter colors (A0, A1, A2, A3, B1, B2, C1, Bleach) of the same product with the same or lower opacity may be cured in 5 sec.

Date of the Information September 2011



(fr) Matériaux d'obturation composite permettant un temps d'exposition de 5 secondes

S'il est possible de rapprocher le guide faisceau au maximum, les matériaux d'obturation composite mentionnés ici, tout comme les teintes les plus claires (A0, A1, A2, A3, B1, B2, C1, Bleach) du même produit avec une opacité égale ou inférieure, peuvent être polymérisés en 5 secondes.

Mise à jour de l'information septembre 2011



(es) Materiales de obturación (composites) que permiten un tiempo de exposición de 5 segundos

Si la guía de luz se puede situar a una distancia mínima, los materiales de obturación (composites) mencionados así como los colores más claros (A0, A1, A2, A3, B1, B2, C1, Bleach) del mismo producto con la misma opacidad o inferior pueden endurecerse en 5 segundos.

Estado de la información Septiembre 2011



3M Deutschland GmbH
Dental Products
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss – Germany

3M ESPE
Dental Products
St. Paul, MN 55144-1000 U.S.A.

Charisma, CeramX, Estelite, EsthetX, Grandio, QuiXX, Tetric, TPH3 and Venus are registered trademarks. 3M, ESPE, Filtek and Paradigm are trademarks of 3M Company or 3M Deutschland GmbH. Used under license in Canada. © 2012, 3M. All rights reserved.